

Bolsa de orina de 100 ml

Instrucciones de uso

REF: EN0100

Descripción:

La bolsa de orina está disponible con una capacidad de 100 ml. Está fabricada con película de PVC de grado médico y dispone de un tubo de PVC resistente a los acodamientos. El diseño consta de la bolsa propiamente dicha con función de vaciado y una unidad de control con entrada (conector Luer Lock). Se trata de un producto sanitario de clase I destinado exclusivamente a un solo uso.

Indicación:

Este producto está destinado a recibir y recoger la orina drenada a través de un catéter, así como a permitir el posterior vaciado de la orina recogida. Es especialmente adecuado para bebés prematuros y niños pequeños.

Contraindicaciones: Ninguna

Efectos secundarios: Ninguno

Función de medición:

La escala impresa sirve únicamente como referencia para el personal sanitario. Para realizar mediciones exactas debe utilizarse un recipiente graduado adecuado.

Instrucciones de uso:

- Lávese siempre bien las manos antes y después de vaciar la bolsa.
- Coloque la bolsa a la altura de la vejiga o por debajo de ella.
- Cierre la válvula de vaciado antes de conectar la bolsa al catéter o a otro producto sanitario. La bolsa debe sustituirse siguiendo las indicaciones del personal sanitario.
- Compruebe periódicamente el sistema para asegurarse de que la orina fluye sin obstrucciones.
- Al alcanzar el nivel máximo de llenado, abra la válvula de vaciado y vacíe la orina en un recipiente colector adecuado.
- Después del vaciado, vuelva a cerrar la válvula y límpiela cuidadosamente con una toallita desinfectante para eliminar todos los residuos.
- Para obtener una muestra de orina fresca, introduzca un dispositivo de recogida adecuado en la abertura del tubo mientras el paciente orina y regule el flujo de orina durante la recogida.
- Para controlar el flujo de orina, utilice el dispositivo situado en el tubo y asegúrese de que no se produzcan obstrucciones.

Indicaciones de seguridad:

- Destinado exclusivamente a un solo uso. Después de su uso, deseche el producto con los residuos domésticos. La reutilización aumenta el riesgo de infecciones y puede perjudicar el funcionamiento del producto o provocar su fallo.
- Solo debe ser utilizado por personal sanitario debidamente formado.
- Durante el uso, la bolsa debe colgar en posición vertical; el tubo no debe presentar acodamientos ni bucles.
- Protéjalo de la luz solar directa, temperaturas extremas y humedad elevada.

