

Urinbeutel 100ml

Gebrauchsanweisung

REF: EN0100

Beschreibung:

Der Urinbeutel ist in einer Größe von 100 ml erhältlich. Er wird aus PVC-Folie in medizinischer Qualität gefertigt und besitzt einen knickfesten PVC-Schlauch. Die Konstruktion umfasst den eigentlichen Beutel mit Ablassfunktion sowie eine Steuereinheit mit Einlass (Luer-Lock-Anschluss). Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Klasse I, das ausschließlich für den einmaligen Gebrauch vorgesehen ist.

Indikation:

Dieses Produkt dient der Aufnahme und Sammlung von Urin, der über einen Katheter abgeleitet wird, sowie dem anschließenden Abfluss des gesammelten Urins. Es eignet sich insbesondere für Frühgeborene und Kleinkinder.

Kontraindikationen: Keine

Nebenwirkungen: Keine

Messfunktion:


Die aufgedruckte Skala dient dem medizinischen Personal lediglich als Orientierungshilfe. Für exakte Messungen ist ein geeigneter Messbecher zu verwenden.

Gebrauchsanweisung:

- Vor und nach dem Entleeren des Beutels stets gründlich die Hände waschen.
- Den Beutel in Höhe oder unterhalb des Blasenniveaus anbringen.
- Vor dem Anschluss an den Katheter oder ein anderes Medizinprodukt das Ablassventil schließen. Der Austausch des Beutels erfolgt nach Vorgabe des medizinischen Fachpersonals.
- Das System regelmäßig kontrollieren, um sicherzustellen, dass der Urin ungehindert fließt.
- Bei Erreichen des maximalen Füllstands das Ablassventil öffnen und den Urin in einen geeigneten Auffangbehälter entleeren.
- Nach dem Entleeren das Ablassventil wieder schließen und mit einem Desinfektionstuch sorgfältig reinigen, um sämtliche Rückstände zu entfernen.
- Für die Entnahme von frischem Urin ein geeignetes Entnahmegerät in die Öffnung des Schlauchs einführen, während der Patient uriniert, und den Urinfluss währenddessen regulieren.
- Zur Steuerung des Urinflusses das Gerät am Schlauch verwenden und darauf achten, dass kein Stau entsteht.

Sicherheitshinweise:

- Ausschließlich zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach der Benutzung im Hausmüll entsorgen. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko von Infektionen und kann die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen oder zum Ausfall führen.
- Nur durch geschultes medizinisches Fachpersonal verwenden.
- Während der Anwendung muss der Beutel aufrecht hängen; der Schlauch darf keine Knicke oder Schleifen aufweisen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit schützen.

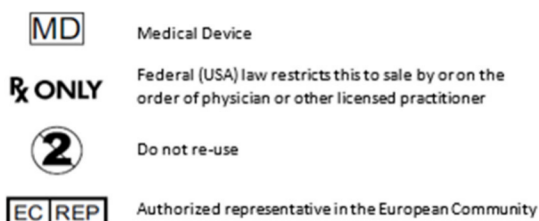

JIANGSU HONGXIN MEDICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.
East Side of Jinhua Road
Economic Development Zone
223600 Shuyang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

MEDOVIS Healthcare GmbH
Marktring
8523 Frauental
Austria

Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80,
20537 Hamburg, Germany